


Hände waschen oder Händedesinfektionsmittel verwenden.

Das Testkit sollte Folgendes enthalten:

- 1 Testkassette
- 1 Lysepufferflasche (jeweils mit 1 mL)
- 1 Steriler einzeln verpackter Swab
- 1 Probenahmeröhrchen und Kappe
- 1 Papiergestell, 4 Vertiefungen
- 1 Kurzanleitung


Layout aller Elemente. Lesen Sie die Anweisungen, bevor Sie fortfahren.

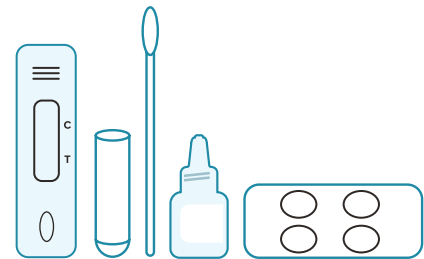

1 Vorbereitung

(in einem sauberen, trockenen Bereich, in dem sich keine anderen Tests befinden)

1. Falten Sie das Papiergestell und setzen Sie das Probenröhrchen ein.
2. 10 Tropfen Lysepuffer in das Probenröhrchen geben.

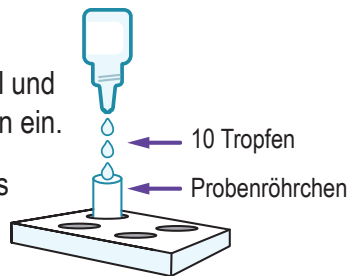


2 Probenentnahme

1. Nehmen Sie den Nasenabstrich-Swab aus der Verpackung. Berühren Sie das Ende des Swabs nicht mit Ihren Händen.
2. Führen Sie die gesamte saugfähige Spitze des

Swabs in ein Nasenloch ein, aber führen Sie den Swab nicht mehr als 1,5 cm in die Nase ein und drehen Sie ihn langsam mindestens 6 Mal gegen die Nasenwand.

3. Mit demselben Swab im anderen Nasenloch wiederholen.
4. Den Swab in das Probenröhrchen mit dem oben vorbereiteten Lysepuffer transferieren.
5. Den Lysepuffer mit dem Swab für mindestens 6 Umdrehungen langsam umrühren.
6. Den Swab etwa 3 Minuten im Probenröhrchen belassen.
7. Entfernen Sie den Swab aus dem Probenröhrchen, indem Sie die Außenseite des Probenröhrchens mit Ihren Fingern zusammendrücken, um so viel Flüssigkeit wie möglich aus dem Swab zu entfernen und ordnungsgemäß zu entsorgen.
8. Setzen Sie die Kappe/den Tropfer auf das Probenröhrchen.

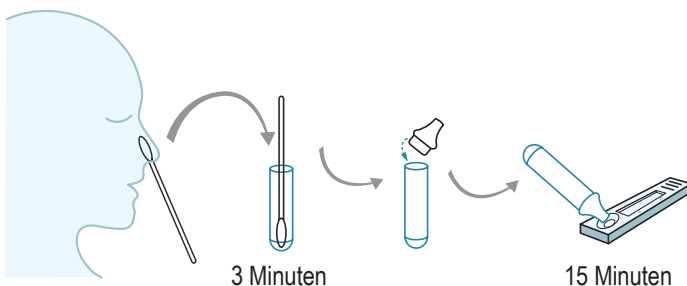


3**Test**


1. Öffnen Sie den Beutel, entnehmen Sie die Testkassette und legen Sie sie auf eine saubere, desinfizierte, flache Oberfläche.
2. Stellen Sie den Timer auf 15 Minuten ein.
3. 4 Tropfen aus dem Probenahmeröhrchen in die Mitte der Probenvertiefung (mit einem „S“ gekennzeichnet) auf der Kassette geben. Die Tropfen langsam auftragen, damit die Flüssigkeit absorbiert wird und nicht überläuft.
4. Timer starten.
5. Lesen Sie die Ergebnisse nach 15-20 Minuten ab. Die Ergebnisse nicht nach 20 Minuten ablesen.
6. Entsorgen Sie die gebrauchte Testkassette, das Probenröhrchen und den Nasenabstrichtupfer ordnungsgemäß als medizinischen Abfall.

4**Ablezen der Ergebnisse**

Dieser Test enthält eine integrierte Kontrollfunktion (C-Linie), die sich nach der Zugabe der Probe entwickelt. Die Kontrolllinie zeigt an, dass der Test gültig ist. Sie müssen eine Linie an der C-Linie erhalten. Wenn keine C-Linie oder nur die T-Linie erscheint, gilt der Test als ungültig (*Sie müssen den Test mit einem neuen Testkit wiederholen*).

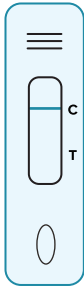**Negativ:**

Wenn nur die C-Linie sichtbar ist, wurde das COVID-19-VIRUS-Antigen **nicht nachgewiesen.**

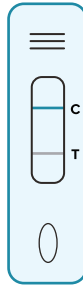
**Positiv:**

Wenn die C-Linie und die T-Linie erscheinen, wird das COVID-19-VIRUS-Antigen **nachgewiesen.**

**Ungültig:**

Wenn keine C-Linie oder nur die T-Linie erscheint, ist der Test **ungültig** (Wiederholung).

sorrento
THERAPEUTICS

 4955 Directors Place
San Diego, CA 92121, Vereinigte Staaten

Kundendienst: 1-800-203-5108
CustomerService@covistix.com

www.sorrentotherapeutics.com

EC **REP**

Qarad EC-REP BV
Pas 257, 2440 Geel, Belgium

REF.: CE-COV-ST01S (1 Test/Box) LIT 0583.01