


Lavarsi le mani con sapone o utilizzare un disinfettante per le mani.

Il kit di test deve contenere quanto segue:

- 1 cassetta per il test
- 1 flacone tampone di lisi (1 ml/cad.)
- 1 tampone sterile confezionato singolarmente
- 1 provetta di campionamento e tappo
- 1 rack di carta, 4 pozzetti
- 1 Guida di riferimento rapido

Disporre tutti gli elementi. Leggere le istruzioni prima di procedere.

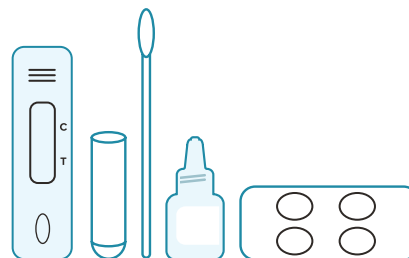


1 Preparazione

(in un'area pulita e asciutta, lontano da altri test)

1. Piegare la cremagliera di carta e inserire la provetta per il campione.


2. Aggiungere 10 gocce di tampone di lisi alla provetta per il campione.

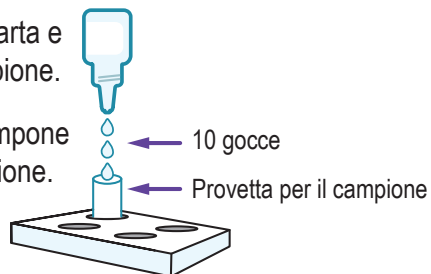

2 Raccolta dei campioni

1. Estrarre il tampone nasale dalla confezione. Non toccare l'estremità del tampone con le mani.

2. Inserire l'intera punta assorbente del tampone in

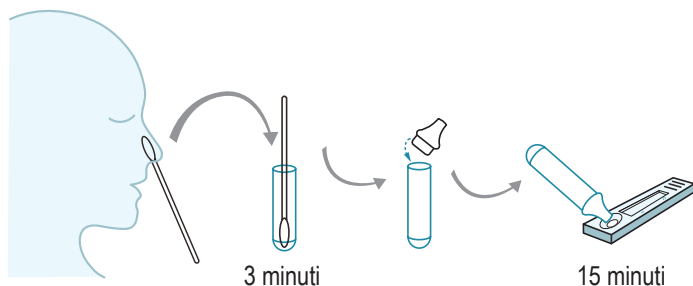

una narice, ma non inserire il tampone più di 1,5 cm (3/4 di pollice) nel naso e ruotare lentamente almeno 6 volte contro la parete della narice.

3. Utilizzando lo stesso tampone, ripetere con l'altra narice.

4. Trasferire il tampone nella provetta per il campione contenente il tampone di lisi preparato in precedenza.

5. Utilizzando il tampone, agitare lentamente il tampone di lisi per almeno 6 rotazioni.

6. Lasciare il tampone nella provetta per circa 3 minuti.

7. Rimuovere il tampone dalla provetta di campionamento comprimendo la parte esterna della provetta per il campione con le dita per rimuovere quanto più liquido possibile dal tampone e smaltirlo correttamente.


8. Posizionare il tappo/il contagocce sulla provetta di campionamento.

3**Test**


1. Aprire la busta, rimuovere la cassetta di test e posizionarla su una superficie piana pulita disinfettata.
2. Impostare il cronometro per 15 minuti.
3. Applicare 4 gocce dalla provetta di campionamento al centro del pozzetto del campione (etichettato con una "S") sulla cassetta. Applicare le gocce lentamente in modo che il liquido sia assorbito e non fuoriesca.
4. Avviare il cronometro.
5. Leggere i risultati dopo 15-20 minuti. Non leggere dopo 20 minuti.
6. Smaltire correttamente la cassetta di test, la provetta per il campione e il tampone nasale utilizzati come rifiuti medici.

4**Letture dei risultati**

Questo test contiene una funzione di controllo integrata (linea C) che si sviluppa dopo aver aggiunto il campione. La linea di controllo indica che il test è valido. È necessario ottenere una linea alla linea C. Se non compare alcuna linea C o solo la linea T, il test è considerato non valido (*dovrà ripetere il test con un nuovo kit di test*).

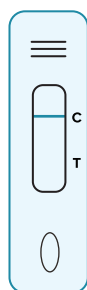**Negativo:**

Se è visibile solo la linea C, l'antigene del VIRUS della COVID-19 **non è rilevato**.

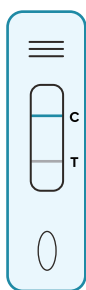**Positivo:**

Se compaiono la linea C e la linea T, l'antigene VIRUS della COVID-19 è **rilevato**.

**Non valido:**

Se non compare alcuna linea C o solo la linea T, il test non è **valido** (ripetere).

sorrento
THERAPEUTICS

 4955 Directors Place
San Diego, CA 92121, Stati Uniti

Servizio clienti: 1-800-203-5108
CustomerService@covistix.com

www.sorrentotherapeutics.com

EC **REP**

Qarad EC-REP BV
Pas 257, 2440 Geel, Belgium

RIF.: CE-COV-ST01S (1 test/scatola) LIT 0591.01