


手を洗うか、手指消毒剤を手に広げます。

検査キットの梱包内容：

- 検査カセット1台
- 溶解バッファ1瓶（1 mL/各）
- 個別包装の滅菌スワブ1本
- キャップ付き検体チューブ1本
- 4ウエルのペーパーラック1台
- クイックリファレンスガイド1冊

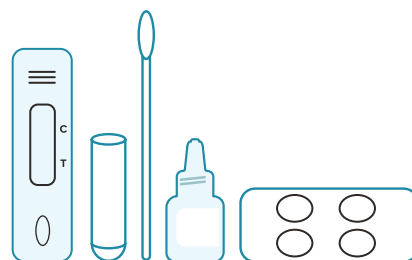


全ての品目を並べます。取扱説明書を読んでから処理を進めてください。

1 準備


（他の検査から離れている清潔で乾燥した場所で）

1. ペーパーラックを折り、検体チューブを差し込みます。
2. 溶解バッファを10滴、検体チューブに滴下します。

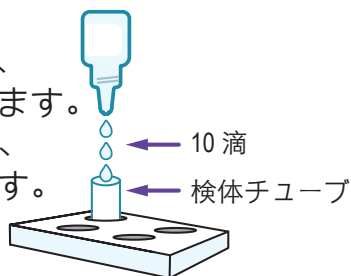

2 試料採取

1. 鼻腔スワブをパッケージから取り出します。スワブの先端に手が触れないようにしてください。

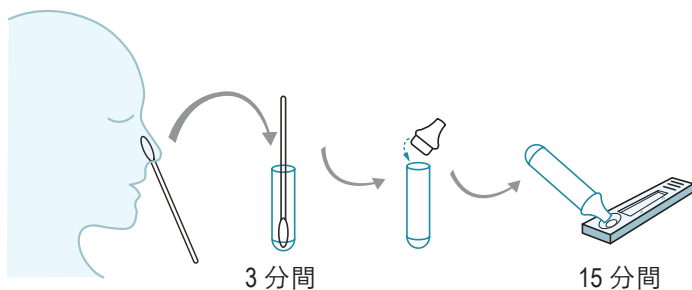

2. スワブの吸収チップ全体を片方の鼻孔に入れます。ただし、1インチの4分の3以上（1.5 cm）を鼻に入れないでください。スワブを鼻孔壁に押し当てて、6回以上ゆっくりと回転させます。

3. 同じスワブを使って、反対側の鼻孔でも繰り返します。

4. 上記で調製した溶解バッファ入りの検体チューブにスワブを移します。

5. スワブを使って、溶解バッファをゆっくりと6回以上かき混ぜます。

6. スワブを検体チューブの中で約3分間静置します。

7. 検体チューブの外側を指でしっかりと押さえながらスワブを抜き出して、スワブからできるだけ多くの液体が採取されるようにし、適切に廃棄します。


8. キャップ/スポイトを検体チューブにはめます。

3 検査


1. パウチを開けて検査カセットを取り出し、消毒済みの清潔で水平な場所に置きます。
2. タイマーを15分間に設定します。
3. カセットの検体ウェル（「S」とラベル表示）の中央に、検体チューブから4滴を滴下します。液体がウェルに吸収され、かつあふれ出さないように、ゆっくりと滴下します。
4. タイマーを開始します。
5. 15～20分後に結果を判定します。20分後以降は判定しないでください。
6. 使用済みの検査カセット、検体チューブ及び鼻腔スワブを医療廃棄物として適切に廃棄してください。

4 結果判定

本検査には、試料を添加した後に現れるコントロール機能（Cライン）が組み込まれています。コントロールラインは検査が有効であることを示します。Cラインに線が表示されなくてはなりません。Cラインが現れない、又はTラインのみが現れる場合、検査は無効とみなされます（新しい検査キットで再検査が必要となります）。

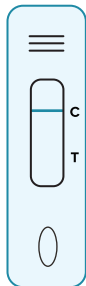

陰性
Cラインのみが
現れる場合、
COVID-19ウイ
ルス抗原は未検出
です。

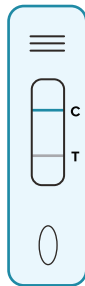

陽性
Cライン及びTラ
インが現れる場
合、COVID-19ウ
イルス抗原は検出
されました。



無効
CラインもTライ
ンも現れない場
合、
検査は無効です
（再検査）。

sorrento
THERAPEUTICS

4955 Directors Place
San Diego, CA 92121, Stati Uniti

カスタマーサービス: 1-800-203-5108
CustomerService@covistix.com

www.sorrentotherapeutics.com

EC REP

Qarad EC-REP BV
Pas 257, 2440 Geel, Belgium

参照: CE-COV-ST01S (1検査/箱) LIT 0595.01