


Lave as mãos ou utilize desinfetante para as mãos.

O kit de teste deve conter:

- 1 cassete de teste
- 1 frasco de tampão de lise (1 ml/cada)
- 1 swab estéril embalado individualmente
- 1 tubo de amostragem e tampa
- 1 Rack de papel, 4 poços
- 1 Guia de referência rápida

Disponha todos os itens. Leia as instruções antes de prosseguir.

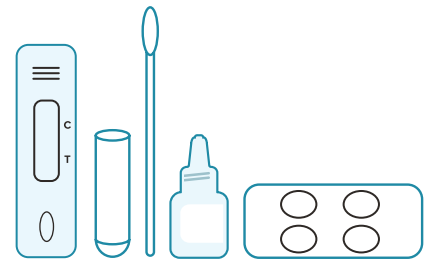


1 Organize os itens

(em uma área limpa e seca longe de outros testes)


1. Dobre a rack de papel e insira o tubo de amostra.

2. Adicione 10 gotas de tampão de lise ao tubo de amostra.

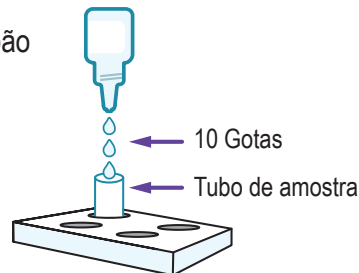

2 Coleta de espécimes

1. Remova o swab nasal da embalagem. Não toque na extremidade do swab com as mãos.

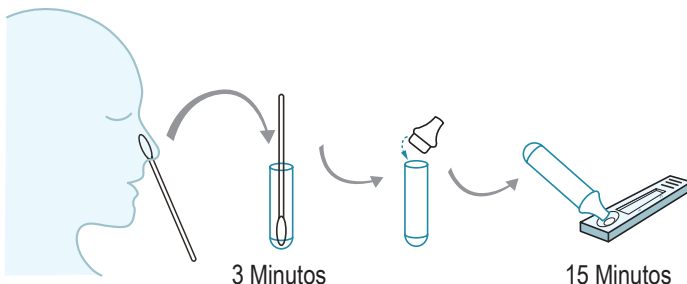

2. Insira toda a ponta absorvente do swab em uma narina, não mais de 3/4 polegada (1,5 cm) no nariz, e gire-o lentamente pelo menos 6 vezes contra a parede da narina.

3. Usando o mesmo swab, repita o processo na outra narina.

4. Transfira o swab para o tubo de amostra contendo o tampão de lise preparado acima.

5. Usando o swab, mexa lentamente o tampão de lise por, pelo menos, 6 rotações.

6. Deixe o swab no tubo de amostra por aproximadamente 3 minutos.

7. Remova o swab do tubo de amostra pressionando a parte externa do tubo de amostra com os dedos para remover o máximo de líquido possível do swab e descarte-o adequadamente.


8. Coloque a tampa/conta-gotas no tubo de amostragem.

3**Teste**


1. Abra o saco, remova o cassete de teste e coloque-o sobre uma superfície plana limpa e desinfetada.
2. Ajuste o cronômetro para 15 minutos.
3. Adicione 4 gotas do tubo de amostragem no centro do poço de amostra (rotulado com um "S") no cassete. Pingue as gotas lentamente para que o líquido seja absorvido e não transborde.
4. Inicie o cronômetro.
5. Leia os resultados em 15–20 minutos. Não leia após 30 minutos.
6. Descarte adequadamente o cassete de teste usado, o tubo de amostra e o swab nasal como resíduo hospitalar.

4**Leitura dos resultados**


Este teste contém um recurso de controle incorporado (linha C) que se desenvolve após adicionar o espécime. A linha de controle informa que o teste é válido. Uma linha deve ser formada na linha C. Se nenhuma linha C ou apenas a linha T é exibida, o teste é considerado inválido (*é preciso testar novamente com um kit de teste novo*).

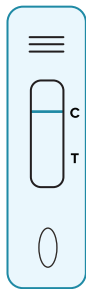**Negativo**

Se apenas a linha C estiver visível, o antígeno do vírus da COVID-19 **não foi detectado.**

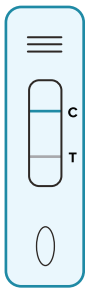
**Positivo**

Se a linha C e a linha T forem exibidas, o antígeno do vírus da COVID-19 foi **detectado.**

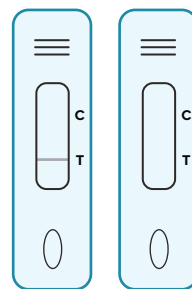**Inválido**

Se nenhuma linha C ou apenas a linha T for exibida, o teste **é inválido** (necessário repetir o teste).

sorrento
THERAPEUTICS

 4955 Directors Place
San Diego, CA 92121, Verenigde Staten

Atendimento ao cliente: 1-800-203-5108
CustomerService@covistix.com

www.sorrentotherapeutics.com

EC **REP**

Qarad EC-REP BV
Pas 257, 2440 Geel, Belgium

REF.: CE-COV-ST01S (1 teste/caixa) LIT 0599.01